


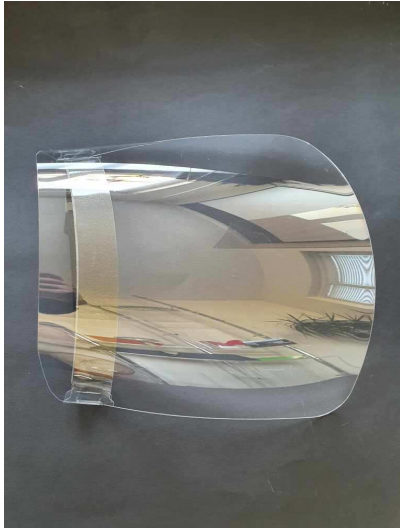

## Information des Herstellers

-gemäß PSA Verordnung (EU) 2016/425-

<b>Produkt</b>	Geschichtsschutz	
<b>Beschreibung</b>	<p>Geschichtsschutz aus PETG als Selbstbausatz Im Bausatz enthalten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Schutzscheibe</li> <li>1x gepolstertes Stirnband</li> <li>1x Textilgurtband</li> <li>2x Ösen zur Verstellung des Gurtbandes</li> <li>1x Klebepads</li> <li>1x Aufbauanleitung</li> </ul> <p>Dieses Produkt schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert sich die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion.</p>	
<b>Verpackung</b>	<p>2er Verpackung 5er Verpackung 10er Verpackung</p> <p>Auf Anfrage sind auch größere Verpackungseinheiten möglich.</p>	
<b>Größe</b>	Einheitsgröße	
<b>Eigenschaften</b>	gemäß EN 166:2001	
<b>Einsatzbereiche</b>	Der Gesichtsschutz kann überall dort eingesetzt werden, wo das Risiko einer Gesundheitsgefährdung, durch eine Tröpfcheninfektion, durch direkten Kontakt zu anderen Personen unvermeidbar ist bzw. Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können.	
<b>Empfehlungen</b>	Dieser Gesichtsschutz schützt gegen Tropfen und Spritzern von Flüssigkeiten, damit reduziert sich die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben. Zur weiteren Reduzierung einer Tröpfcheninfektion kann der Gesichtsschutz in Kombination mit einer Gesichtsschutzmaske verwendet werden.	
 <b>Warnhinweise</b>	<p>Folgende Warnhinweise sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesichtsschutz bietet <b>keinen</b> Schutz gegen mechanische Einwirkungen oder Strahlungsarten (z.B. Sonnenstrahlung, UV, Schweißen, IR)</li> <li>• Gesichtsschutz nur zur Anwendung bei Raumtemperatur</li> <li>• Gesichtsschutz ist <b>nicht</b> Feuerresistent</li> <li>• Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen</li> <li>• Kein beschädigten Gesichtsschutz verwenden, es kann die Sicht und den Schutz beeinflussen</li> <li>• Wenn der Gesichtsschutz beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden</li> </ul>	

<b>Norm / Kennzeichnung</b>	EN 166; persönlicher Augenschutz  <b>NF CE</b>  NF = Herstellerkürzel CE = EU Konformitätserklärung	
<b>Pflegehinweis</b>		Gesichtsschutz kann mit geeignetem Desinfektionsmittel gereinigt werden.
<b>Lagerung</b>	Der Gesichtsschutz sollte an einem trockenen und sauberen Ort gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
<b>Verfallsdatum</b>	Gesichtsschutz nach Erhalt innerhalb von 24 Monaten verwenden.	
<b>Entsorgung</b>	Nach Gebrauch entsorgen, eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.  Defekte oder nicht mehr benötigte Gesichtsschutze können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination.	
<b>Ersatzteile</b>	Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile zu beziehen.	
<b>Konformitäts- erklärung</b>	Unsere Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden sich auf unserer Homepage <a href="http://www.nordform-kunststoffe.de">www.nordform-kunststoffe.de</a>	